




Saneo TENS zur „Tibialis- oder Sakralstimulation“ Neuromodulation

Programm 17 beidseitig

Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	250 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten

Einstellen Programm 17 falls noch nicht im Display sichtbar:


- * Einschalttaste (1) drücken
- * Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
- * Mit Taste (3) Programm P 17 einstellen
- * Programmtaste (2) drücken
- * Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen
- Stimulation Sakrum S2 / S3

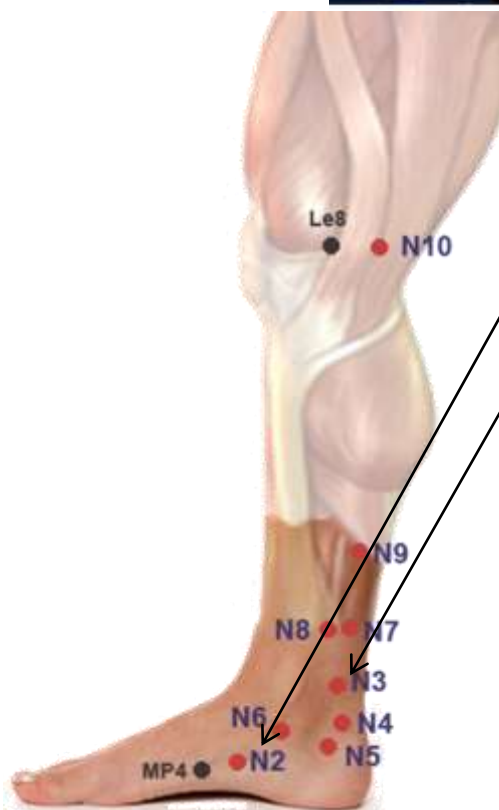

Platzierung auf N3
Pals platinum 25 mm
oder Pals ValuTrode
32 mm

Beim aufdrehen des
Stroms, Plantarflexion
der grossen Zehe.
Strom retour bis keine
Kontraktion mehr da ist.

Angenehmes Kribbeln.

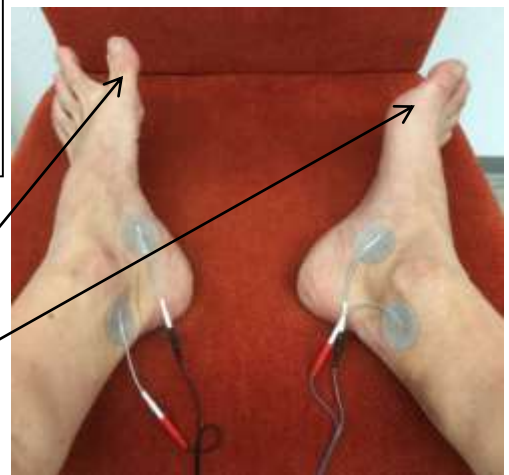




Saneo TENS zur „Tibialis- oder Sakralstimulation“ Neuromodulation

Programm 17 beidseitig

Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	250 uS
	Behandlungszeit	30 Minuten

Einstellen Programm 17 falls noch nicht im Display sichtbar:

- * Einschalttaste (1) drücken
- * Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
- * Mit Taste (3) Programm P 17 einstellen
- * Programmtaste (2) drücken
- * Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen
- Stimulation Sakrum S2 / S3

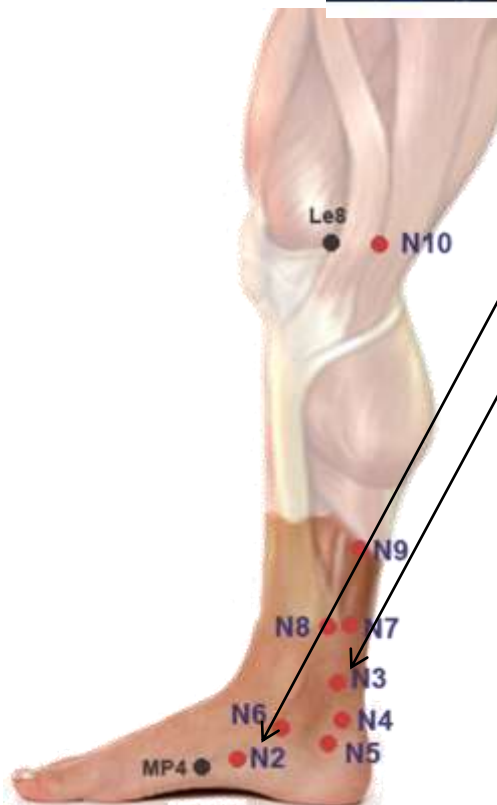

Platzierung auf N3
Pals platinum 25 mm
oder Pals ValuTrode
32 mm

Beim aufdrehen des
Stroms, Plantarflexion
der grossen Zehe.
Strom retour bis keine
Kontraktion mehr da ist.

Angenehmes Kribbeln.

