

Guide de démarrage rapide: *Swiss Edition*

- Brancher le câble dans la prise correspondante Ch.1 ou Ch.2
- Connecter les sondes ou les électrodes et les fixer conformément aux instructions.
- Allumer: appuyer pendant 2 secondes sur la commande rotative ① (L'écran s'allume en bleu). Le dernier programme utilisé s'affiche sous forme de suggestion.
- Sélectionnez le programme souhaité avec le bouton de numérotation rapide ②⑥.
- Changement de programme à l'intérieur du bloc des 10. Appuyez P ⑪ dans l'écran (clignote) ; régler le programme souhaité sur la commande rotative ①
- Commencer le traitement: Appuyer l'écran sur la touche ③ (② LEVEL CH1 clignote). Tourner la commande rotative ①, jusqu'à ce que la force de stimulation souhaitée est atteinte.
- **Commencer le traitement avec appui court sur commande rotative ① L'affichage des minutes ⑳ clignote.**
- Interrompre le traitement (pause): Appuyer sur la commande rotative ① (l'écran clignote vert)
- Continuer le traitement: Appuyer sur la commande rotative ① L'ampérage précédemment réglé s'ajuste automatiquement à nouveau.
- Modifier la force de stimulation pendant le traitement (clef se trouve sur l'écran): Appuyer sur commande rotative ① En suite appuyer deux fois l'écran sur le point ③ (② LEVEL CH1 clignote). Tourner la commande rotative ① jusqu'à ce que la force de stimulation souhaitée est atteinte.

Arrêt d'urgence: appuyer 2 secondes sur commande rotative ①. L'appareil s'éteint.

Plus d'informations sur le fonctionnement dans le mode d'emploi.

En cas de questions: Support Parsenn-Produkte AG, Tel. : 081 300 33 33

① Bouton rotatif avec bouton



Programmes standards

CONSTANT	P 0	Thérapie de la douleur / Suppression de la douleur (Gate Control)
MODULATE	P 10	Thérapie de la douleur / Suppression de la douleur modulée (Gate Control) <u>programme standard douleur</u>
BURST	P 20	Thérapie de la douleur, basse fréquence, modulation neurale (Endorphine)
MUSCULAR	P 30	Stimulation musculaire / Entraînement à l'innervation
ACUTE PAIN	P 40	Thérapie de la douleur aiguë / modulation neurale modulé (Gate Control)
CHRONIC PAIN	P 50	Thérapie de la douleur (douleurs chroniques) / modulation neurale

Pour les questions techniques:



parsenn-produkte ag
kosmetik • pharma • medizintechnik

CH-7240 Küblis
Tel: 081 300 33 33
Fax: 081 300 33 39
www.parsenn-produkte.ch
info@parsenn-produkte.ch

Pavé tactile

TENS CONSTANT

P	F (Hz)	↔ (µs)	⊕	Utilisation
0	85	100	30	Thérapie de la douleur / Suppression de la douleur (Gate Control)
1	100	150	30	
2	10	200	45	
3	20	200	30	Modulation neurale externe
4	20	200	60	Modulation neurale-sacrée chez les enfants
5	8	400	20	
6	8	200	30	Modulation neurale musculaire, relaxation,
7	2	250	30	Kaada, relaxation
8	75	50	40	Anesthésie, douleurs neuropathique
9	120	40	40	

Pavé tactile

TENS MODULATE

P	M	F1 (Hz)	F2 (Hz)	↔ (µs)	SW Zeit (sek)	F1-F2 Zeit (sek)	⊕ (min')	Utilisation
10	SW	90	80	Auto	1	-	30	Thérapie de la douleur / suppression de la douleur modulé (Gate Control), programme standard
11	SW	1	10	Auto	1	-	30	
12	SW	10	20	Auto	1	-	30	Modulation neurale sur le bout des doigts
13	SW	50	75	Auto	1	-	30	
14	SW	75	100	Auto	1	-	30	
15	RN	3	100	Auto	1	-	30	
16	F1-F2	10	50	Auto	-	10	30	
17	F1-F2	50	75	Auto	-	3	30	Anesthésie, douleurs neuropathiques
18	F1-F2	50	100	Auto	-	5	30	
19	F1-F2	75	150	Auto	-	6	30	

Pavé tactile

BURST

P	F (Hz)	↔ (µs)	⊕↔ (sek)	⊕↔ (sek)	⊕ (min')	Utilisation
20	75	205	1 (auto)	2 (auto)	45	Thérapie de la douleur, basse fréquence, modulation neurale (Endorphine)
21	80	200	0.5 (preset)	0.5 (preset)	45	Burst, Endorphine, Kaada,
22	30	250	2 (preset)	2 (preset)	60	
23	75	150	0.5 (preset)	1 (preset)	60	Endorphine, effet plus lent, période de détention plus longue
24	100	100	0.5 (preset)	2 (preset)	60	
25	30	250	2 (preset)	2 (preset)	60	
26	50	200	1 (preset)	2 (preset)	60	
27	75	150	0.5 (preset)	1 (preset)	60	
28	100	100	0.5 (preset)	2 (preset)	60	
29	50	50	0.5 (preset)	2 (preset)	60	Modulation neurale, Anesthésie douleurs neuropathiques

Pavé tactile

MUSCULAR

P	F (Hz)	↔ (µs)	⊕↗ (sec)	⊕↔ (sec)	⊕↘ (sec)	⊕↔ (sec)	F↔ (Hz)	⊕ (min')	Utilisation
30 (def.)	40	300	1.5	4	0.5	10	-	15	Stimulation musculaire / Entraînement à l'innervation
31 (TO)	25	300	1	3	0.5	6	-	30	
32 (FR)	60	350	2	5	1	15	-	10	
33 (FE)	50	400	0.1	6	1	8	-	10	Tension réflex, force de vitesse
34 (FO)	35	250	1	8	1	8	-	10	Renforcement de la force, entraînement à l'innervation
35 (MR)	3	250	2	60	2	0	-	10	
36 (RI)	5	250	3	60	3	0	-	5	
37 (CA)	8	250	3	60	3	0	-	15	
38 (FR)	50	350	0.1	6	1	8	-	10	
39 (RE)	110	250	0	2	0	5	2	10	

MR = Relaxation des muscles RI = Réchauffer CA = Capillarisation
 RE = Résistance TO = Tonification FO = Force FR = Résilience
 FE = Force de vitesse

Pavé tactile

ACUTE PAIN

P	Sous-Programme	Modulation SW-2F-C	F1 (Hz)	F2 (Hz)	↔ (µs)	SW t. (sec)	F1/F2 t. (sec)	⊕ (min')	⊖ Total (min')	Utilisation
40 (def.)	A	SW (RDN)	50	100	75-40 (auto)	1	-	15	30	Thérapie de douleurs aiguës / Modulation neurale modulé (Gate Control)
41	A	SW	75	100	50-40 (auto)	1	-	20	20	
42	A	F1/F2	75	10	50-250 (auto)	-	10	20	20	
43	A	C	75	-	50 (auto)	-	-	20	20	
44	A	SW	1	100	400-40 (auto)	1	-	30	30	
45	A	C	100	-	40 (auto)	-	-	15	15	
46	A	C	3	-	340 (auto)	-	-	3	30	
	B	C	75	-	50 (auto)	-	-	27		
47	A	C	3	-	340 (auto)	-	-	3	30	
	B	SW	50	100	75-40 (auto)	1	-	20		
	C	SW	14	2	210-380 (auto)	1	-	7		
48	A	C	3	-	340 (auto)	-	-	3	30	
	B	F1/F2	70	90	55-40 (auto)	-	5	15		
	C	SW	10	100	250-40 (auto)	1	-	12		
49	A	C	3	-	340 (auto)	-	-	3	30	
	B	SW	1	10	400-250 (auto)	1	-	10		
	C	SW	60	80	65-45 (auto)	1	-	17		

Pavé tactile

CHRONIC PAIN

P	Sous-Programm	Modulation SW-2F-C	F1 (Hz)	F2 (Hz)	↔ (µs)	SW t. (sec)	F1/F2 t. (sec)	⊕ (min')	⊖ Total (min')	Utilisation
50 (def.)	A	SW	1	25	400-100 (auto)	1	-	30	30	Thérapie de douleurs chez douleurs chroniques / Modulation neurale
51	A	F1/F2	3	10	360-250 (auto)	-	10	30	30	
52	A	SW (RND)	1	15	400-200 (auto)	2	-	30	30	
53	A	C	3	-	400 (auto)	-	-	5	30	
	B	SW	1	25	400-100 (auto)	1	-	20		
54	A	C	3	-	400 (auto)	-	-	5	30	
	B	F1/F2	3	10	360-250 (auto)	-	10	25		
55	A	C	3	-	400 (auto)	-	-	5	30	
	B	SW (RND)	1	15	400-200 (auto)	2	-	25		
56	A	SW	3	12	400-230 (auto)	1	-	10	40	
	B	SW	75	5	50-300 (auto)	1	-	15		
	C	SW	10	2	250-380 (auto)	1	-	15		
57	A	C	3	-	400 (auto)	-	-	5	40	
	B	SW	1	25	360-250 (auto)	1	-	15		
	C	F1/F2	3	10	400 (auto)	-	10	20		
58	A	C	3	-	360-250 (auto)	-	-	5	40	
	B	F1/F2	3	10	400-200 (auto)	-	10	15		
	C	SW	1	15	250-40 (auto)	2	-	20		
59	A	C	2	-	400 (auto)	-	-	5	40	
	B	C	5	-	300 (auto)	-	-	15		
	C	C	10	-	250 (auto)	-	-	20		