



## Saneo TENS zur Schmerztherapie oder Neuromodulation

Einstellen der gewünschten Programme falls noch nicht im Display sichtbar:

- \* Einschalttaste (1) drücken
- \* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
- \* Mit Taste (3) Programm P auf gewünschte Nummer einstellen
- \* Programmtaste (2) drücken
- \* Stromstärke einstellen (3 / 4)



**Standardprogramme:**

- P1 Schmerztherapie TENS Anästhesie / Schmerzunterdrückung**  
Unterhalb der Muskelstimulation einstellen, kribbeln spürbar  
Nach 5 Minuten muss eine Schmerzreduktion da sein.
- P2 Schmerztherapie TENS moduliert Anästhesie / Schmerzunterdrückung**  
Bei längeren Anwendungen weniger Gewöhnungseffekt bei der Therapie.  
Unterhalb der Muskelstimulation einstellen, kribbeln spürbar.  
Nach 5 Minuten muss eine Schmerzreduktion da sein.
- P15 Neuromodulation intern mit Sonden oder extern bei Muskelverspannungen**  
Strom einstellen bis ein leichtes Klopfen spürbar ist. Eventuell kurze Muskelkontraktionen.  
Anwendungen täglich über mindestens 4 Wochen.
- P16 Kaada-Stimulation an der Hand (Neuromodulation bei Schmerzen)**  
Strom einstellen bis ein leichtes Klopfen spürbar ist. Ohne Muskelkontraktionen  
Anwendung täglich über mindestens 4-12 Wochen.
- P17 Neuromodulation extern (Verbesserung der sensorischen/motorischen Funktionen)**  
Strom einstellen bis ein leichtes Kribbeln spürbar ist. Ohne Muskelkontraktionen  
Anwendung zur Fingerspitzenstimulation oder bei Sensorischen Defiziten bei neurologischen Befunden.  
Bei Schmerzen oder neurologischen Befunden bei neuropathischen Schmerzen.  
Anwendung täglich über mindestens 4-12 Wochen.

# Anwendung zur Tibialis- oder Sakralstimulation „Neuromodulation“



## Programm 17 beidseitig

Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	250 $\mu$ S
	Behandlungszeit	30 Minuten

### Einstellen Programm 17 falls noch nicht im Display sichtbar:

- \* Einschalttaste (1) drücken
- \* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
- \* Mit Taste (3) Programm P 17 einstellen
- \* Programmtaste (2) drücken
- \* Stimulation Tibialisnerv an beiden Fussknochen


Stimulation Sakrum S2 / S3

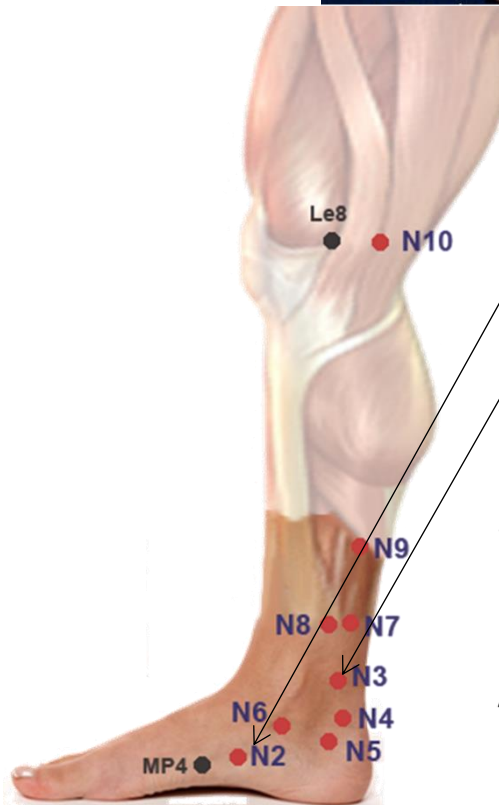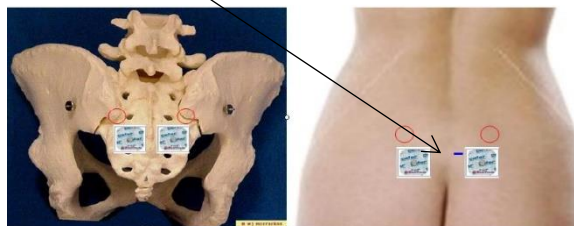

Platzierung auf N3  
Pals platinum 25 mm  
oder Pals ValuTrode  
32 mm

Beim aufdrehen des  
Stroms, Plantarflexion  
der grossen Zehe.  
Strom retour bis keine  
Kontraktion mehr da ist.

Angenehmes Kribbeln.

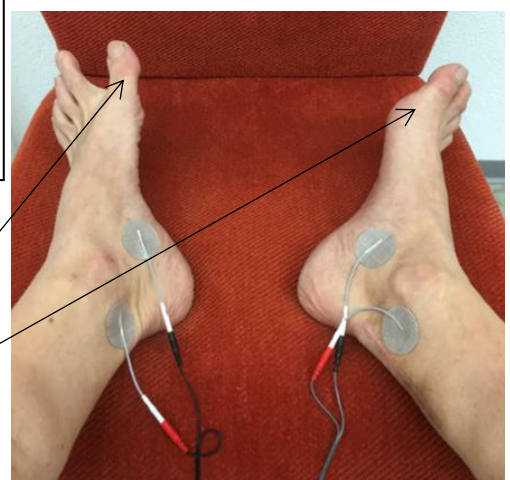

## Anwendung zur Neuromodulation an den Fingerspitzen (alternativ zum TipStim)

### Programm 17 beidseitig (Alternative P13)


Einstellungen:	Stimulationsmodus	kontinuierlich TENS
	Frequenz	20 Hz
	Pulsbreite	250 µS
	Behandlungszeit	30 Minuten

#### Einstellen Programm 17 falls noch nicht im Display sichtbar:


- \* Einschalttaste (1) drücken
- \* Programmtaste (2) 3 Sekunden drücken (P blinkt)
- \* Mit Taste (3) Programm P 17 (oder P13) einstellen
- \* Programmtaste (2) drücken
- \* Elektroden an den Fingern wie im Bild anbringen, je ein Kanal pro Finger anschliessen.
- \* Strom mit (3 + 4) pro Kanal soweit aufdrehen, bis ein wahrnehmbares Kribbeln ohne Kontraktion spürbar ist.



**Behandlung täglich 4 – 12 Wochen eine halbe Stunde.**

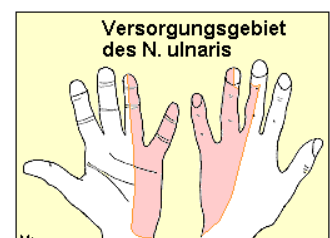

Nervus medianus

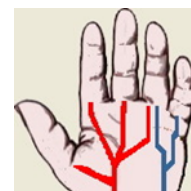

Nervus ulnaris